

<b>Serología Citomegalovirus IgM / CMV IgM</b>	
MÉTODO	Enzimoinmunoensayo.
PREPARACIÓN	Ayuno 9 horas.
MUESTRA	Suero.
OTRAS MUESTRAS	
VALOR REF.	Negativos: ausencia de infección activa. Positivos: presencia de infección activa.
OBSERVACIONES	Ver comentarios.

**Comentarios:**

Estabilidad en suero: -20 °C..... hasta 3 meses.  
 2-8 °C.....hasta 7 días.

Las muestras tratadas con calor o que sufran más de 4 ciclos de congelación/descongelación no deben analizarse con este ensayo.

Aparición: 7 días después de los signos/síntomas.  
 Duración: 2 a 9 meses.

Pacientes inmunodeprimidos los ac. IgM pueden persistir 2 o más años. En reactivación o reinfección puede fallar la producción de IgM.

En infecciones recurrentes de pacientes transplantados sí se ha encontrado IgM.

<b>INTERFERENCIAS</b>			
<b>SUERO HEMOLIZADO</b>	<b>SUERO LIPÉMICO</b>	<b>SUERO ICTÉRICO</b>	<b>POR FÁRMACOS</b>

<b>ENFERMEDADES / ALTERACIONES</b>	
Infección aguda	▲
Reinfección	▲